



Aktiv KAS

Asphärische formstabile Keratokonulinse




BESCHREIBUNG

Formstabile Keratokonulinse mit progressiv asphärischer Optikzone. Ideal zur Versorgung von Keratokonus.



ANPASSEMPFEHLUNG

Zu Beginn jeder Anpassung sollte nach Möglichkeit eine Hornhauttopographie erstellt werden. Jedoch ist eine Topographie nur eine annähernde Darstellung der effektiven Hornhautbeschaffenheit, aber dennoch eine wichtige Hilfe um die erste Probelinse schon weitgehend passend zu bestimmen. Nach Beurteilung des Fluoresceinbildes mit Hilfe der Probelinse kann das Design der Definitivlinse bestimmt werden.

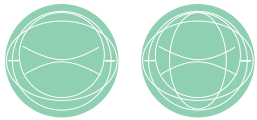

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

Die Aktiv KAS kann mit der progressiv verlaufenden Vorderflächengeometrie der Multi Excellent kombiniert werden.

Man erhält eine Additionswirkung, welche sich speziell in der Mitteldistanz positiv bemerkbar macht. Dadurch wird z.B. das Arbeiten am Computer erleichtert. Ideal für Jungpresbyope, da der Blick auf den Bildschirm unverändert bleibt, ohne die Kopfhaltung zu verändern.

Genauere Informationen zur Multi Excellent auf Seite 26


Lieferbereich*		Abstufung
Radius	5,5 mm bis 9,00 mm	5 / 100
Durchmesser	8,5 mm bis 11,6 mm	5 / 100
Sphärisch	+/- 30,0 dpt	0,12 dpt
Zyl. bei torischer Ausführung	-0,5 bis -6,0 dpt	0,12 dpt
Achse bei torischer Ausführung	1° bis 180°	1°
Exzentrizität	frei wählbar	5 / 100
Materialien	laut Materialtabelle	

* Weitere Lieferbereiche auf Anfrage möglich



Aktiv KS

Sphärische formstabile Keratokonulinse

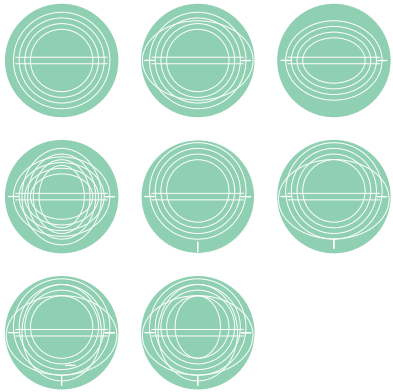

BESCHREIBUNG

Formstabile Keratokonulinse mit sphärischer Optikzone und fünfkurviger Randabflachung. Komfortbevel für optimalen Tränenflüssigkeitsaustausch. Ideal zur Versorgung von Keratokonus

ANPASSEMPFEHLUNG

Zu Beginn jeder Anpassung sollte nach Möglichkeit eine Hornhauttopographie erstellt werden. Jedoch ist eine Topographie nur eine annähernde Darstellung der effektiven Hornhautbeschaffenheit, aber dennoch eine wichtige Hilfe um die erste Probelinse schon weitgehend passend zu bestimmen. Nach Beurteilung des Fluoresceinbildes mit Hilfe der Probelinse kann das Design der Definitivlinse bestimmt werden.

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

Die Aktiv KS kann mit der progressiv verlaufenden Vorderflächengeometrie der Multi Excellent kombiniert werden.

Man erhält eine Additionswirkung, welche sich speziell in der Mitteldistanz positiv bemerkbar macht. Dadurch wird z.B. das Arbeiten am Computer erleichtert. Ideal für Jungpresbyope, da der Blick auf den Bildschirm unverändert bleibt, ohne die Kopfhaltung zu verändern.

Genauere Informationen zur Multi Excellent auf Seite 26

Lieferbereich*		Abstufung
Radius	5,5 mm bis 9,00 mm	5 / 100
Durchmesser	8,5 mm bis 11,6 mm	5 / 100
Sphärisch	+/- 30,0 dpt	0,12 dpt
Zyl. bei torischer Ausführung	-0,5 bis -6,0 dpt	0,12 dpt
Achse bei torischer Ausführung	1° bis 180°	1°
Exzentrizität	frei wählbar	5 / 100
Materialien	laut Materialtabelle	

* Weitere Lieferbereiche auf Anfrage möglich